





*Projeto que visa fácil saída e entrada da cama...*





## *Cama Hospitalar Innov8 Low*

*A cama Innov8 Low tem uma altura excepcionalmente baixa sendo uma característica chave, a cama pode ser utilizada em UTI e unidades de internação sem comprometer os resultados dos pacientes.*

A prevenção de queda é um maior risco gerenciado hoje nos hospitais. A Innov8 Low da Sidhil fornece uma total solução funcional, com o acrescento do benefício de uma plataforma externamente baixa de altura ajusta até 22,5 cm.

A cama Innov8Low a cama sobe do nível mais baixo para 71 cm e incorpora um compreensivo range de operações elétrica com as seguintes funções: auto ajuste, cadeira cardíaca e regressão automática para evitar o pinçamento e deslizamento do paciente. Com duas posições Trendelenburg e Trendelenburg reversa a Innov8 low pode trabalhar com carga de peso até 255 kg.

Plataforma em painéis com especial desenho para facilitar a circulação de ar, para simplificar a descontaminação e aumentar o controle de infecção. Todas as camas da linha Innov8 são confiáveis e fácil para manter, incorpora magnífica ergonomia nos controles manuais e conforto ao usuário.

*...faz o melhor*

# Projetada visando a segurança do paciente

## BAIXA ALTURA DE DISTÂNCIA

Escala de altura excepcionalmente baixa de 22.5cm a 71 cm. Ao abaixar a cama na altura padrão, a cama movimentará com a velocidade máxima até atingir os 42cm, altura em que um alarme de aviso sonoro começará para alertar o cuidador de que a cama está abaixando para uma altura menor do que a padrão. A cama só pode ser posicionado na altura menor através do controle do enfermeiro.

## TRILHOS LATERAIS

A Innov8 Low é um equipamento sem trilhos laterais. Grades padrão ou alta estão disponíveis como opção de fábrica.



# Projetada em torno do controle de infecção

## PLATAFORMA PARA O COLCHÃO EM PAINÉIS

Superfície lisa, fácil de limpar, especialmente concebida para respirar e com canais para reduzir o represamento de líquidos, simplificando a descontaminação e para melhorar o controle da infecção.

04

# Projetada baseada das necessidades clínicas



## **FUNÇÃO CPR**

Fácil acesso para alavanca manual de PCR. O elétrico PCR está localizado no controle de enfermagem.



## **EXTENSÃO DA CAMA INTEGRADA**

A extensão integrada para pacientes altos (+20 cm) combina fácil uso e funcionalidade



## **APOIO PARA BAIXA ALTURA**

Baixa altura do apoio dos pés melhora a visibilidade do paciente. A cabeceira e o apoio dos pés são removíveis, tem cores diferentes como opção de gerenciamento

## CONTROLE DO PACIENTE

O controle do paciente é projetado para limitar as funções do paciente. Permite o controle do encosto, do joelho e altura da da cama. A altura da cama pode ajustada entre 42cm e 71cm usando o controle do paciente, isso reduz a possibilidade de aprisionamento quando o paciente não é supervisionado pela enfermagem.




ENCOSTO:  
ELEVAR / DESCER

ALTURA DA CAMA:  
ELEVAR / DESCER


AUTO CONTORNO:  
ELEVAR / DESCER

## TRAVA DAS RODAS

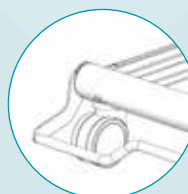


### **Travar:**

Todas as rodas são travadas

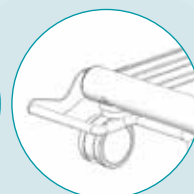

### **Livre:**

Todas as rodas estão livres para fácil movimento em um espaço limitado

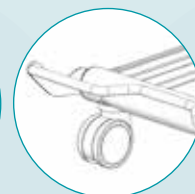

### **Alinhar:**

Para facilitar o movimento em volta e entre os espaços

# Projetado para o fácil uso

## PAINEL DO CONTROLE DE ENFERMAGEM:




O painel de controle da enfermagem acessa todas as funções da cama; deve ser usado somente pelo cuidador. Apenas no controle de enfermagem pode levar a cama para o seu nível mais baixo de altura. O controle foi projetado para ser fixado no fim da cama, sobre a extremidade da cama - alternativamente, pode ser utilizado o nosso NOVO suporte do controle de enfermagem (Disponível como acessório)

### CONTROLE INNOV8 LOW

## FUNÇÃO DE BLOQUEIO:

Para bloquear uma função, um dos símbolos deve ser pressionado simultaneamente com a função para bloqueio. Uma luz acenderá na parte inferior do botão da função, isto indica que a função está agora bloqueada.

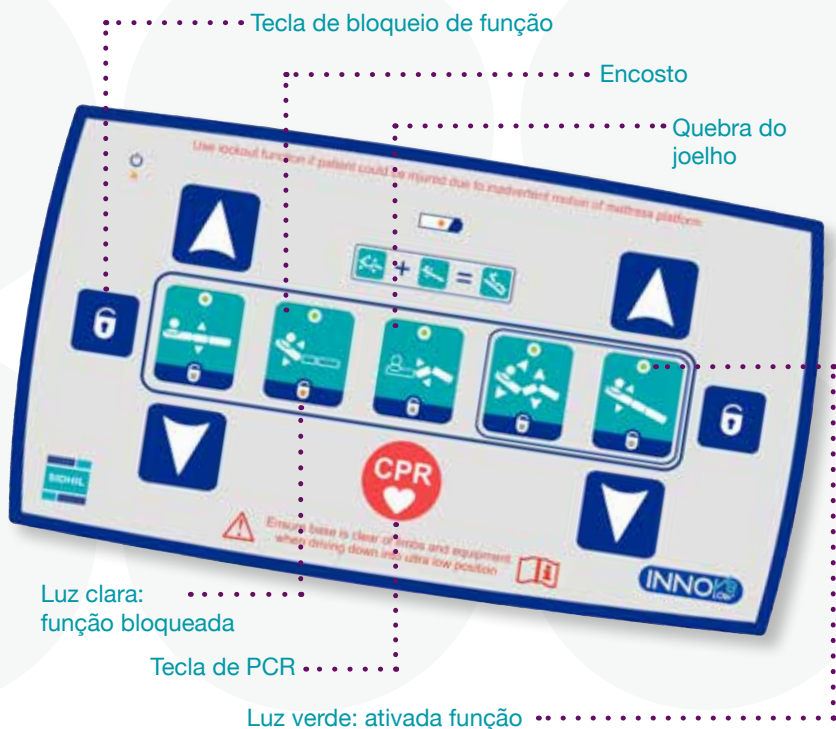

## CARACTERÍSTICAS CHAVES:

- Com ranger de 22,5cm a 71cm
- Trabalha com carga segura até 255Kg;
- 3 anos de garantia (Primeiro ano partes e funcionamento, segundo e terceiro ano somente peças)
- Fácil de limpar e descontaminar
- Funcionamento elétrico do descanso das costas, altura e flexão dos joelhos com bateria de backup
- Espaço embaixo da cama de 12 cm (plataforma mínimo de colchão com altura de 40cm)
- Posição cadeira cardíaca automática
- Sistema de travamento da cama com trava central - acessível em ambos os lados da cama
- Extensão da plataforma para pacientes altos (+/- 20cm)
- Fácil de manusear, reduz problemas de coluna e de mãos
- Removível cabeceira e peseira, com opção de cores
- Proteção IP 54
- Máximo de peso do paciente 190 Kg
- Fabricação e suporte no Reino Unido

## CÓDIGOS DE PRODUTOS:

### Códigos da cama:

Cama hospitalar modelo Innov8 LOW, 220V, sem os trilhos laterais	INNOV8/LOW/AQ/L/BRZ/230
Cama hospitalar modelo Innov8 LOW, 110V, sem os trilhos laterais	INNOV8/LOW/AQ/L/BRZ/110
Cama hospitalar modelo Innov8 LOW, 220V, com grades laterais na altura padrão	INNOV8/LOW/AQ/L/RSR/BRZ/230
Cama hospitalar modelo Innov8 LOW, 110V, com grades laterais na altura padrão	INNOV8/LOW/AQ/L/RSR/BRZ/110
Cama hospitalar modelo Innov8 LOW, 220V, com grades laterais alta	INNOV8/LOW/AQ/L/HSR/BRZ/230
Cama hospitalar modelo Innov8 LOW, 110V, com grades laterais alta	INNOV8/LOW/AQ/L/HSR/BRZ/110

### Dimensões

Comprimento total	218cm (238cm quando estendido completo)
Largura total	102cm
Altura do colchão (mínimo)	22.5cm
Altura do colchão (máxima)	71cm
Altura (máxima)	120cm
Peso máximo do paciente	190kg (30st)
Máximo de trabalho de carga seguro	255kg (40st)

### Acessórios:

Suporte para elevação Innov8 para camas IQ e LOW	INNOV8/LP/BRAZIL
Suporte de soro Innov8 para camas IQ e LOW	INNOV8/RANGE/DP/BRAZIL
Suporte para o controle de enfermagem Innov8 para camas IQ e LOW	INNOV8/RANGE/OC/BRAZIL
Suporte de tração - quadro Balkan Innov8 para camas IQ e LOW	INNOV8/RANGE/HSH/BRA
Suporte de tração - quadro Balkan Innov8 para camas IQ e LOW	INNOV8/TBB/BRAZIL
Suporte de tração localizado nos pés da cama Innov8 para camas IQ e LOW	INNOV8/TFE/BRAZIL
Colchão PREMIUM CRASH, altura 5cm largura 67 cm e comprimento 185 cm	MAT/FALL/BRAZIL
Colchão ESSENTIALS CRASH	MAT/FALL/BAS/BRAZIL
Controle do paciente para cama LOW	CONTROL/073
Suporte para o controle (LOW)	CONTROL/099
Grades laterais com altura padrão para Innov8 LOW (par)	INNOV8/LOW/SR/BRAZIL
Grades laterais alta para Innov8 LOW (par)	INNOV8/LOW/HSR/BRAZIL
Capa acolchoada para as grades laterais com altura padrão para Innov8 LOW (par)	INNOV8/LOW/SR/PAD/BRAZIL
Capa acolchoada para as grades laterais alta para Innov8 LOW (par)	INNOV8/LOW/HSR/PAD/BRAZIL

*Uma completa linha de colchões estão disponíveis na Sidhil para o Innov8 Low*

# Serviços e manutenção



## CENTROS DE REPARO EM TODO O MUNDO

Ao longo dos anos a Assistência Técnica da H. Strattnner vem se aprimorando para oferecer um serviço de pós-venda com excelência, visando atingir o reconhecimento de nossos clientes.

A H. Strattnner com exclusividade garante peças originais e trabalha de acordo com o manual técnico de cada fabricante, assegurando a integridade e originalidade dos nossos equipamentos.


Com intuito de promover maior tempo de equipamento disponível e minimizar falhas ocasionais, planejamos e realizamos manutenções preventivas.

## CONTRATOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

A manutenção programada é a melhor forma de contribuir para o gerenciamento de riscos por falhas e paradas.

Contamos com modalidades de contratos adequados com o produto e as necessidades de cada cliente.

Para maiores informações, por favor entre em contato com a nossa Assistência Técnica.

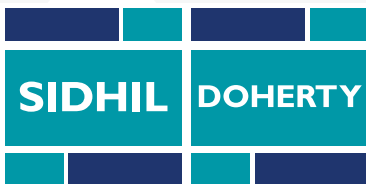

Distribuidor Exclusivo no Brasil



Entre em contato com o nosso time de vendas:  
SP: (11) 2185 2300 / RJ: (21) 2121 1300

