

MediaFIT™ –

A nova geração de pinças desmontáveis para a mediastinoscopia



MediaFIT™ –

mais ergonomia e maior facilidade de uso

O design ergonômico das novas pinças **MediaFIT™** facilita e otimiza o trabalho e torna as pinças extremamente amigáveis ao usuário. A construção delgada permite visualização livre e total mobilidade na preparação bimanual.

O comprimento útil dos novos instrumentos **MediaFIT™** os torna perfeitamente compatíveis com o mediastinoscópio de vídeo expansível seg. LINDER/HÜRTGEN e com os mediastinoscópios de vídeo seg. LERUT.



MediaFIT™ –

fáceis de desmontar

Um movimento manual é suficiente para separar a empunhadura da haste externa e do adaptador de trabalho. Em uma segunda etapa, os instrumentos podem ser desmontados em suas três peças fáceis de limpar. Para a utilização, estas podem ser de novo facilmente montadas.



Puxe o deslocador para trás ...

... e então separe a haste externa da empunhadura, juntamente com o adaptador de trabalho.



Em seguida, solte ainda o fechamento de baioneta por meio de um quarto de rotação e extraia o adaptador de trabalho da haste.

MediaFIT™ –

a higiene perfeita torna-se a coisa mais simples mundo

Pela completa facilidade de desmontagem, a nova série de pinças **MediaFIT™** atende as mais altas exigências na preparação. Com a nova construção, são evitadas cavidades inacessíveis e outros locais que acumulam sujeira, de forma que na limpeza e esterilização não restam impurezas e resíduos.

MediaFIT™ –

vantagens econômicas

O completo sistema desmontável **MediaFIT™** permite a combinação de diferentes adaptadores de pinça com uma empunhadura. Isto permite uma montagem fina dos instrumentos. Além disso, é possível a reposição e o reparo de componentes individuais, de forma que você somente terá que arcar com os custos da peça defeituosa do instrumento.



MediaFIT™ –

A nova geração de pinças desmontáveis para a mediastinoscopia






Características especiais:

- Design ergonômico e fácil manuseio
- Qualidade comprovada e construção das pontas a partir de instrumentos existentes para a mediastinoscopia para o habitual trabalho preciso
- Completamente desmontáveis nos componentes a seguir:
 - Empunhadura
 - Haste externa
 - Adaptador de trabalho
- Utilização eficiente e econômica dos instrumentos devido à construção modular
- Limpeza fácil e segura
- Esterilizável em autoclave




MediaFIT™ –

A nova geração de pinças desmontáveis para a mediastinoscopia

Haste externa	Empunhadura
Comprimento 23 cm	550000
	
Adaptador de trabalho	Instrumento completo
10900 M	10971 M
	Pinça de tampão e preparação MediaFIT™ seg. MAASSEN
10900 GO	10971 GO
	Pinça para excisão de amostra MediaFIT™, pontas ovais, tamanho 8 x 16 mm
10900 GP	10971 GP
	Pinça para excisão de amostra MediaFIT™, pontas ovais, tamanho 6 x 12 mm
10900 GR	10971 GR
	Pinça para excisão de amostra MediaFIT™, pontas em forma de colher, redondas, Ø 5 mm

Acessórios

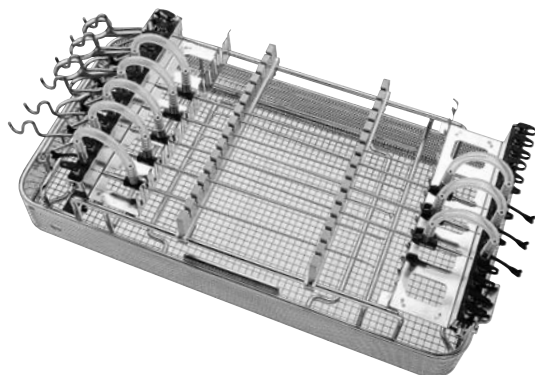

39219 XF **Prateleira de instrumentos**, com um bloco de lavagem, 15 conexões

39219 XFB **Prateleira de instrumentos**, com dois blocos de lavagem de 15 conexões cada



39753 A2 **Recipiente** com MicroStop para esterilização e conservação estéril, 600 × 300 × 210 mm, incluindo:

Fundo do recipiente

Tampa do recipiente

Disco de barreira contra germes (MicroStop)

Medidas internas: (L x P x A)

548 mm x 267 mm x 186 mm

Opcional:

39502 V **Cesto de peneira** para limpeza, esterilização, transporte e armazenagem de instrumentos. Para utilização com a prateleira 39219 XF. Com parede de placa perfurada e alças suspensas retráteis. Medidas externas (L x P x A): 228 × 248 × 45 mm

39100 PS 12 **Pinos de fixação** incluindo parafuso e arruela para o parafusamento nos cestos de peneira para fixação de instrumentos, utilizável com fixador de silicone 39360 AS. Medidas externas: 9 × 38 mm

39100 SH **Esteira de silicone "Large Diamond"**, azul, malha extra larga, para a armazenagem de instrumentos em cestos de rede padrão, recipientes de plástico e recipientes de esterilização. Medidas externas: 240 × 230 mm

ENDOWORLD

KARL
STORZ
Germany

KARL
STORZ
Germany

ENDOWORLD®

WWW.KARLSTORZ.COM

KARL STORZ GmbH & Co. KG
Mittelstraße 8, 78532 Tuttlingen, Alemanha
Postbox 230, 78503 Tuttlingen, Alemanha
Telephone: +49 (0)7461 708-0
Fax: +49 (0)7461 708-105
E-Mail: info@karlstorz.de
www.karlstorz.com

KARL STORZ Marketing América Do Sul Ltda.
Rua Joaquin Floriano, n°. 413
20° andar/floor, Itaim Bibi
CEP-04534-011 Sao Paulo, Brasil
Tel.: +55 11 3526-4600
Fax: +55 11 3526-4680
E-Mail: info@karlstorz.com.br

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE
THE DIAMOND STANDARD

EW THOR 7-PT/06-2011