

## **ADENDO PARA INSTRUMENTOS OFTALMOLÓGICOS** **95-114834 Manual do Operador STATIM 2000/5000 G4**

**O objetivo deste adendo é incluir instrumentos comumente utilizados na Oftalmologia que serão esterilizados na STATIM 2000/5000 G4.**

### **5.2.1. Ciclo Não Embalado** **(STATIM 2000 G4)**

O Ciclo Não Embalado é um ciclo de esterilização de uso geral para esterilizar até 1,0 kg (2,2 lbs.) de instrumentos metálicos sólidos, como alicates, brocas, sondas exploradoras e fórceps. Peças manuais dentárias e instrumentos de Facoemulsificação (ocos/lúmen) podem ser esterilizados neste ciclo.

Para selecionar o Ciclo Não Embalado, pressione o botão Ciclo Não Embalado e, então, pressione o botão INÍCIO.

### **5.3.1. Ciclo Não Embalado** **(STATIM 5000 G4)**

O Ciclo não embalado é usado para esterilizar cargas leves (menos de 0,5 kg ou 1,1 lbs.) de instrumentos metálicos sólidos, como alicates, brocas, sondas exploradoras e fórceps. Instrumentos de Facoemulsificação (ocos/lúmen) podem ser esterilizados neste ciclo.

Para selecionar o Ciclo Não Embalado, pressione o botão Ciclo Não Embalado e, então, pressione o botão INÍCIO.

### **5.3.4. Ciclo Não Embalado de Carga Pesada** **(STATIM 5000 G4)**

O Ciclo Não Embalado de Carga Pesada é usado para esterilizar grandes cargas de instrumentos metálicos não embalados pesando até 1,5 kg (3,3 lbs.). Peças de manuais dentárias e instrumentos de Facoemulsificação (ocos/com lúmen) podem ser esterilizados neste ciclo. O uso do Cassete Estendido STATIM 5000 (n.º do pedido 01-112509S) permitirá a esterilização de endoscópios rígidos neste ciclo.

Para selecionar o Ciclo Não Embalado de Carga Pesada, pressione o botão Ciclo Não Embalado de Carga Pesada e, então, pressione o botão INICIAR.