



# Statim G4 NOVA GERAÇÃO 5000 & 2000

## AUTOCLAVES DE CASSETE RÁPIDA, GENTIL, CONFIÁVEL E INTELIGENTE.

STATIM é a autoclave de cassete mais rápida do mundo, desde o início até a sua esterilização, suave com seus instrumentos devido ao seu processo de vapor patenteado e confiável para as práticas mais utilizadas.

Com base em mais de 25 anos de inovação, a líder em tecnologia de autoclave criou uma linha completa de autoclaves de cassete STATIM - projetadas para atender às necessidades de todos os tamanhos de prática. A família STATIM compreende as autoclaves cassete mais rápidas e inovadoras disponíveis no mercado atualmente.

- Câmara de esterilização móvel
- Bandeja estéril de trabalho
- Caixa de transporte e armazenamento



**SciCan** | Your Infection  
Control Specialist



STATIM G4 é o esterilizador de cassete mais rápido realizando as etapas de acondicionamento, esterilização e secagem.

- ✓ Usando apenas uma pequena quantidade de água para cada ciclo, a STATIM aquece e converte em vapor em poucos segundos.
- ✓ O design inovador da câmara totalmente removível da STATIM permite aquecimento e resfriamento rápidos.
- ✓ Uma solução completa: esterilização rápida com secagem rápida através da tecnologia de secagem STATIM Dri-Tec.



Por mais de 25 anos, a velocidade, confiabilidade e confiabilidade do STATIM o tornaram o esterilizador ideal para todas as práticas.

- ✓ Profissionais de saúde em mais de 90 países ao redor do mundo confiam no STATIM para proteger seus pacientes e funcionários contra infecções.
- ✓ O espírito de inovação que fez da STATIM uma parte integrante de cada CME há mais de 25 anos e ainda é evidente com os avanços tecnológicos como a tecnologia G4 que traz automação para o CME.



Tecnologia G4 - informações ao seu alcance.

- ✓ A tecnologia G4 habilitada para WiFi pode conectar e enviar dados de ciclo para seus dispositivos inteligentes ou computador, permitindo que a equipe se concentre na coisa mais importante em uma clínica odontológica, os pacientes.
- ✓ Lembretes de manutenção, instruções e a opção de atualizações automáticas de software mantêm sua STATIM em boas condições de funcionamento.
- ✓ A tecnologia G4 conecta sua STATIM a técnicos especializados, o que permite suporte remoto e minimiza o tempo de inatividade desnecessário.

## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- **Conectividade:** Uma vez conectada à rede, permite visualizar todo o histórico de ciclos e informações pertinentes ao equipamento. Basta digitar o número do IP do equipamento em qualquer navegador.
- **Sistema de geração imediata de vapor:** A Statim conta com um gerador de vapor próprio e integrado, capaz de gerar vapor em apenas alguns segundos.
- **Sistema de remoção de ar:** Tecnologia exclusiva que permite a remoção de ar forçada por meio de injeção de vapor no interior do CASSETE.
- **Exclusivo sistema de cassete:** As finas paredes de aço inoxidável do CASSETE da STATIM permitem rápido aquecimento e resfriamento da câmara.
- **Painel Touch Screen:** Colorido, multi interativo e de alta resolução, oferece visualização mais nítida de mensagens e informações sobre o ciclo atual.
- **Rastreabilidade:** O SciCan Datalogger armazena informações de ciclo durante toda a vida útil do equipamento. As informações podem ser obtidas via USB ou impressora externa.

### CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO:

	Ciclo	Temperatura de Esterilização	Tempo de Esterilização	Tempo total do Ciclo*
STATIM 2000 G4	Desembalados	134°C	3,5 minutos	6 minutos
	Embalados	134°C	10 minutos	14 minutos
	Plástico e Borracha	121°C	15 minutos	20 minutos
	Secagem	Secagem apenas		
STATIM 5000 G4	Desembalados	134°C	3,5 minutos	9 minutos
	Embalados	134°C	6 minutos	17,5 minutos
	Plástico e Borracha	121°C	15 minutos	24 minutos
	Instrumentos com Canais internos/canulados	134°C	6 minutos	12 minutos

\*o tempo de secagem não está incluso.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

	STATIM G4 2000	STATIM G4 5000	STATIM G4 5000 ENDO
Dimensões externas (C x L x A) cm	50 x 41,5 x 16	60 x 41,5 x 19	60 x 41,5 x 19
Dimensões do cassete (C x L x A) cm	28 x 18 x 3,5	38 x 18 x 7,5	49 x 18 x 7,5
Volume da camara de esterilização	1,8 litros	5,1 litros	5,5 litros
Tensão / Frequência	110V - 60 Hz		
Potência (KW)	1450 W		
Peso	21Kg	33Kg	

Equipamento	Código	Descrição
	G4-121105	Statim G4 2000
	01-112406S	Cassete G4 2000
	G4-211101	Statim G4 5000 ENDO
	01-112509S	Cassete G4 5000 ENDO
	G4-201101	Statim G4 5000

Equipamento	Código	Descrição
	01-112384S	Cassete G4 5000
	320ZPLUS 80ZPLUS 20ZPLUS	STATDRI 909 ml STATDRI 240 ml STATDRI 60 ml
	01-112867S	STAT MAT 2000
	01-112868S	STAT MAT 5000

Vamos juntos transformar  
o futuro da sua **CME?**

**Strattner**