


StatClean - Limpador ultrassônico

MANUAL DO USUÁRIO

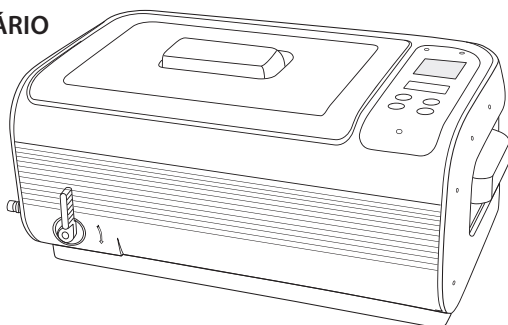

CARACTERÍSTICAS:

Grande capacidade do tanque	Capacidade do tanque: 6,0 L / 1,6 galões. Tamanho do tanque: 34,0 x 20,5 x 9,9 cm / 13,4" x 8,1" x 3,9"
Cesto de aço inoxidável	Adequado para cartuchos de 15 x 23 cm (6" x 9") ou menores, ou instrumentos avulsos
Painel de controle com tecnologia de detecção capacitiva	Tampo em painel sólido. Durável, confiável e resistente à água e a produtos químicos agressivos.
Válvula de drenagem	Fácil de usar.
Recurso de memória	Recupera a última configuração do timer.
Dois potentes transdutores ultrassônicos empilhados	Distribuição uniforme de ondas ultrassônicas, limpeza profunda e alta durabilidade.
Display LED de 3 cores	Timer com alcance total de 1 a 30 minutos, degaseificador e termômetro.
Circuito de controle independente para cada transdutor ultrassônico	Eficiência de limpeza 40% maior, não suscetível a interferências, mais durável.
Protetores de circuito múltiplos	Em caso de sobrecarga ou uso indevido, os protetores desligam a energia em determinadas áreas para proteger a máquina.
Placa de circuito impresso à prova de umidade com circuito integrado industrial	Adequado para diferentes ambientes de trabalho com melhor desempenho anti-interferência.
Dois ventiladores de resfriamento	Um para resfriamento de placas de circuito impresso e outro para resfriamento de transdutores ultrassônicos. Melhora a dissipação de calor e é benéfico para operações contínuas.
Projeto estrutural sólido e avançado	Carcaça com parede de 4,5 mm de espessura, feita de plástico de engenharia com design de encaixe macho-fêmea para melhor desempenho à prova d'água e resistente a quedas.

INTRODUÇÃO

Princípios da limpeza ultrassônica

O efeito de limpeza é obtido através de vibrações de alta frequência que produzem bolhas de ar dentro do líquido, as quais, ao entrarem em contato com um objeto, desalojam os detritos.



Usar água da torneira é suficiente; no entanto, recomenda-se o uso de água filtrada para melhores resultados.

Leia o manual primeiro

Antes de utilizar o dispositivo, consulte o manual. Os avisos e as instruções devem ser seguidos cuidadosamente.

ÍNDICE

Precauções de segurança	1
Estrutura e acessórios do produto	3
Painel de controle e operações	4
Diretrizes de Operação	5
Operações de memória	7
Métodos comuns de limpeza	8
Vista explodida do produto	10
Cuidados e manutenção	12
Especificações	14
Garantia	14

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA



Eletrodomésticos e limpadores representam riscos potenciais à vida de crianças. POR FAVOR, MANTENHA-OS LONGE E FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.



Para evitar choques elétricos com risco de vida, observe o seguinte:

Perigo de choque elétrico! Não utilize durante o banho. Nunca mergulhe o dispositivo ou o cabo de alimentação em água ou qualquer outro líquido.

- > Perigo de choque elétrico! Nunca toque, insira ou remova o plugue da tomada com as mãos molhadas.
- > Perigo de choque elétrico! Caso o aparelho tenha caído na água durante o funcionamento, não o toque. Primeiro, retire o cabo de alimentação da tomada.
- > Perigo de choque elétrico! Não borrife nenhum líquido sobre o dispositivo.
- > Siga as instruções do manual para operar o dispositivo e nunca o deixe funcionando sem supervisão.
- > Não utilize componentes não aprovados pelo fabricante.
- > Remova o cabo de alimentação segurando o plugue e não o cabo.
- > Mantenha o cabo de alimentação longe de obstruções (portas de armários, cadeiras, etc.) e superfícies quentes para evitar danos ao cabo.
- > Não utilize o aparelho se alguma de suas partes (plugue, cabo, carcaça, etc.) estiver danificada.
- > Não desmonte o dispositivo, exceto por profissionais.
- > Caso o plugue de alimentação, o cabo, a carcaça ou outras partes do aparelho estejam danificados, não utilize o aparelho.
- > Se a unidade estiver danificada, não funcionar ou tiver caído na água, leve-a a um revendedor autorizado para manutenção.
- > Retire o plugue da tomada:
 - se ocorrer mau funcionamento antes de limpar o dispositivo
 - se o dispositivo não for usado por um período prolongado após cada uso (recomendado)
- > A instalação de um disjuntor diferencial residual (DR) com corrente de disparo nominal de no máximo 30 mA proporciona proteção adicional contra choque elétrico. A instalação deve ser realizada apenas por um eletricitista qualificado.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA



Para evitar riscos de incêndio, observe o seguinte:

- › Não coloque o aparelho sobre superfícies macias (cama, sofá, etc.) nem bloqueie as aberturas de ventilação do aparelho. Mantenha as aberturas de ventilação livres de quaisquer obstruções.
- › Observe os demais avisos da seção anterior.
- › Caso o cabo de alimentação esteja danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de serviço ou por uma pessoa qualificada para evitar riscos.



Use água filtrada para obter melhores resultados.

Outras observações:

- › **Não utilize o aparelho sem encher o reservatório com água. Funcionar sem combustível danificará a unidade.**
- › Não ligue o cabo de alimentação antes de adicionar água ao tanque. Não encha o tanque acima da linha "Max" para evitar transbordamento.
- › Não utilize soluções que contenham substâncias abrasivas ou soluções químicas fortemente corrosivas não recomendadas pelo fabricante ou fornecedor.
- › Para operar a unidade, utilize-a sobre uma superfície seca e plana.
- › Quando a unidade é exposta a interferências eletromagnéticas severas, pode apresentar mau funcionamento, parar de operar ou perder suas funções de controle. Caso isso aconteça, desconecte o cabo de alimentação e, em seguida, reconecte-o para reiniciar o dispositivo.



INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA:


Ao utilizar aparelhos elétricos, devem sempre ser seguidas precauções básicas, incluindo as seguintes:

- › Utilize apenas acessórios recomendados ou vendidos pelo fabricante.
- › Não utilize em ambientes externos.
- › Para desconectar, gire todos os controles para a posição desligado e, em seguida, retire o plugue da tomada. Não desligue puxando o cabo. Para desligar, segure a ficha, não o cabo. Desligue da tomada quando não estiver em uso e antes de realizar qualquer manutenção ou limpeza.

AVISOS ADICIONAIS:

1. Não deixe entrar água na carcaça.
2. Não utilize o aparelho continuamente por mais de 30 minutos para evitar o superaquecimento. A limpeza normal leva 5 minutos por camada de instrumentos ou cartucho. Faça uma pausa de cerca de 1/3 a 1/2 da duração total, caso precise de mais tempo.
3. NÃO pulverize desinfetantes sobre a unidade. Limpe apenas a unidade.
4. Limpe qualquer líquido presente no painel de controle antes de tocá-lo.
5. Seque a água condensada da tampa antes de colocá-la no suporte.

ESTRUTURA E ACESSÓRIOS DO PRODUTO

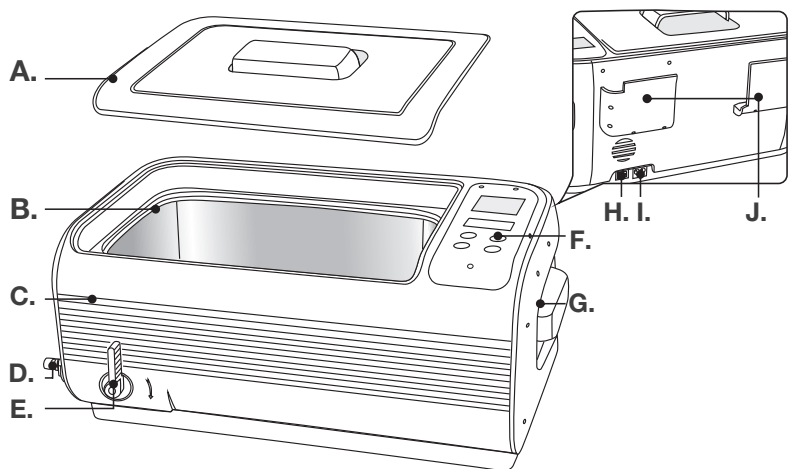

- | | |
|---|--------------------------------------|
| A. Capa superior | F. Painel de controle |
| B. Tanque de aço inoxidável | G. Alças |
| C. Carcaça | H. Interruptor de alimentação |
| D. Conexão de tubo de drenagem | I. Tomada elétrica |
| E. Alavanca da válvula de drenagem | J. Suporte de capa |


ACESSÓRIOS PADRÃO:



Cabo de alimentação



Mangueira

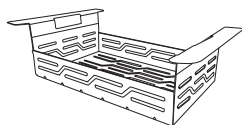








Cesto de aço inoxidável






1. Exibição do tempo de funcionamento
2. Termômetro de múltiplos estágios
3. Luz de aviso
4. Estado de degaseificação
5. Tecla de configuração rápida do timer
6. Tecla de redução do timer
7. Estado de limpeza normal
8. Tecla Iniciar/Parar
9. Tecla Degas

PAINEL DE CONTROLE E OPERAÇÕES

- 1. 10:00 – Exibição do tempo de funcionamento.** A contagem regressiva começa após o início do trabalho.
- 2.  – Termômetro de múltiplos estágios.** A luz verde fixa indica que a temperatura da água está entre 0 e 30% de 60 °C/140 °F. Uma luz laranja fixa indica que a temperatura da água está entre 30% e 60% de 60 °C/140 °F. A luz vermelha fixa indica que a temperatura da água está entre 60% e 90% de 60 °C/140 °F. A luz vermelha intermitente indica que a temperatura da água está próxima de 60 °C/140 °F. Todas as luzes indicam: a temperatura da água está a 60 °C/140 °F (90-100%).
- 3. Luz de aviso.** Normalmente, poderia ser iluminado nos dois cenários seguintes:
 - a. A proteção contra superaquecimento é acionada por uma ou duas placas de circuito de acionamento. Se for apenas uma placa de circuito impresso, a outra continuará funcionando. Assim que a placa de circuito impresso esfriar, a luz de aviso diminuirá de intensidade.
 - b. Se a luz acender assim que a unidade for ligada, isso indica mau funcionamento em um ou dois cabos de sinal das placas de circuito impresso do transdutor. A unidade pode ser operada normalmente.
- 4.  – Estado de limpeza normal.**  A limpeza normal e com iluminação adequada está em andamento.
- 5.  – Estado de degaseificação.** Com a iluminação ligada, a função de degaseificação está selecionada. A degaseificação instantânea está em andamento.
- 6. Tecla de configuração rápida do timer.** Tocar  Tempo+, ele exibe 10:00 ou outras configurações de timer rápido. Cada toque aumenta o tempo em 5 minutos.
- 7.  – Tecla de redução de tempo.** Tocar  Cada vez que a tecla é pressionada, o cronômetro diminui em 1 minuto.
- 8. Tecla Iniciar/Parar.** Após ligar, o visor LED mostra 10:00, que é o tempo padrão inicial (conforme mostrado), e a unidade está pronta com o status de funcionamento normal. Toque duas vezes na tecla Iniciar/Parar e a limpeza começará. A limpeza para quando o timer chega a 00:00. Caso seja necessário parar o aparelho antes do término do timer, pressione a tecla Iniciar/Parar duas vezes.




Para evitar ligar ou desligar o aparelho acidentalmente, é necessário pressionar a tecla Iniciar/Parar em até 6 segundos para ligá-lo ou desligá-lo.  pisca, indicando que a unidade está funcionando no modo de limpeza normal.

- 9. Tecla de Degas.** Tecla de toque Degas,  Acende, indicando que a função Degaseificar está selecionada. Toque duas vezes na tecla Iniciar/Parar. Para iniciar a degaseificação,  A luz piscará durante 90 segundos e, em seguida, a unidade retornará à função de limpeza normal. Ao pressionar a tecla Degas antes do término do processo, a degaseificação será interrompida.

Degas: Ao limpar objetos muito sujos ou engordurados, ou ainda itens de prata, cobre ou latão, é necessário adicionar soluções químicas à água. A solução pode formar muitas gotículas pequenas e demorar bastante para se dissolver na água. A adição de água recente pode gerar muitas bolhas de ar nas paredes do tanque. Esses fatores reduzirão o efeito de limpeza na fase inicial da limpeza ultrassônica. Ao ativar a função de degaseificação, as gotículas e as bolhas de ar serão dissipadas, geralmente em 90 segundos, melhorando a eficiência da limpeza.

DIRETRIZES OPERACIONAIS

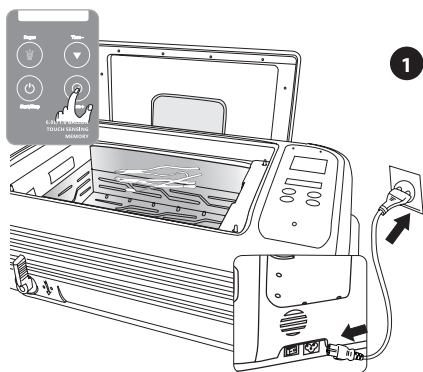

1 CONFIGURAÇÃO DA UNIDADE


1. Conecte o cabo de alimentação na parte traseira da unidade e a uma tomada.
2. Ligue o interruptor de alimentação localizado na parte traseira da unidade.
3. O visor de LED mostra 1:00:00. Esta é a configuração de timer mais comum.

Se precisar ajustar o timer, toque na tecla TIME+ para configurações rápidas e na tecla TIME- para ajustes precisos entre 1 e 30 minutos.

Consulte as instruções do limpador do seu instrumento, bem como as instruções de uso do instrumento, para uma limpeza automatizada adequada.

O tempo de limpeza prolongado pode resultar em:


1. Afrouxe os parafusos, se houver.
2. Se os itens forem banhados e apresentarem rachaduras pré-existentes, essas rachaduras podem se tornar mais visíveis.
3. Revestimentos com danos pré-existentes podem apresentar maior descamação.

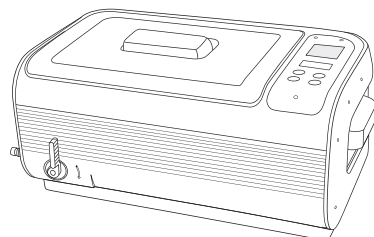

2 PROCEDIMENTO DE DESGASIFICAÇÃO

1. Retire a tampa e coloque-a verticalmente no suporte de tampas. Adicione água à temperatura ambiente até um nível abaixo da linha de enchimento MAX, mas acima da linha de enchimento MIN.
2. Adicione OPT/IM 28 Instrument Cleaning Solution conforme as instruções de uso.
3. Toque na tecla Degas e deixe-a funcionar por 90 segundos.

Consulte as instruções de uso da solução de limpeza do seu instrumento para determinar se a degaseificação é necessária. OPT/IM 28 não requer degaseificação.

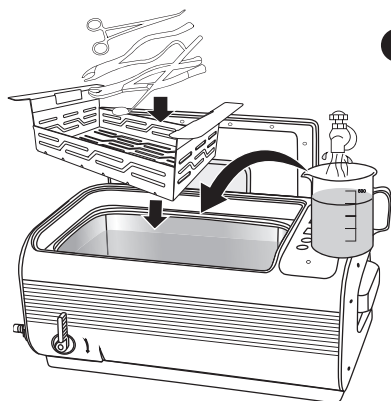


3 CARREGAMENTO DE INSTRUMENTOS

1. Coloque os itens em cartuchos ou cestos e mergulhe-os no tanque de limpeza.
2. Confirme se o nível da água está entre MIN e MAX e acima da área a ser limpa.
3. Caso contrário, adicione água à temperatura ambiente no tanque.



Se o aparelho for ligado sem água, a energia ultrassônica não será absorvida. Devido à alta potência deste aparelho, se permanecer ligado sem água por mais de 15 segundos, poderá sofrer danos, reduzindo drasticamente sua vida útil.


DIRETRIZES OPERACIONAIS

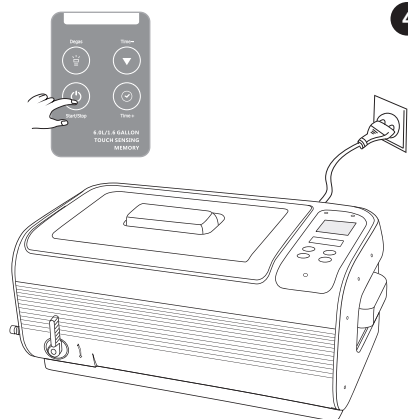

4 LIMPEZA

1. Coloque a tampa na unidade.
2. Toque na tecla de tempo para definir o timer para o tempo desejado. Consulte as instruções de uso da sua solução de limpeza de instrumentos para determinar o tempo de limpeza necessário. OPTIM 28 requer um tempo de limpeza de 5 minutos.
3. Pressione a tecla Iniciar/Parar duas vezes para ativar o ciclo de limpeza.
4. Ao término do ciclo de limpeza, abra a tampa e retire os cartuchos ou o cesto.


Caso seja necessária uma limpeza adicional, reinicie o timer e repita o processo acima.

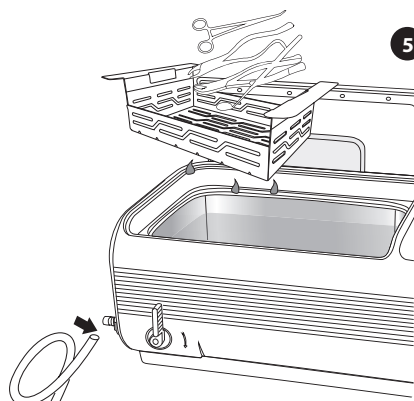

5 RECUPERAÇÃO DE INSTRUMENTOS

Ao término do ciclo de limpeza, abra a tampa e retire os cartuchos ou o cesto.

Seque a água condensada da tampa antes de colocá-la no suporte.

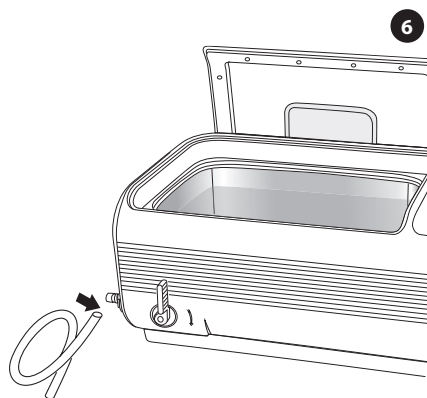

6 DRENAGEM DO TANQUE




No final do dia, o tanque deve ser esvaziado e limpo.

1. Conecte a mangueira ao cano de drenagem conforme mostrado.
2. Gire a alavanca da válvula de drenagem no sentido horário para abrir o ralo e remover a água suja.
3. Limpe e seque bem o tanque.
4. Feche a válvula de drenagem.

OPERAÇÕES DE MEMÓRIA

Equipada com um recurso avançado de memória de desligamento, esta unidade consegue memorizar a última configuração do timer rápido.

Recuperar a última configuração do timer.

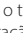1. Quando o timer chegar a   , toque na tecla Iniciar/Parar em até 5 segundos para recuperar/repetir a última configuração do timer rápido ou aguarde 5 segundos até que a última configuração do timer seja exibida.
2. Se o aparelho for desligado durante um ciclo de limpeza, a última configuração do timer será exibida assim que for ligado novamente.
3. Se a configuração do timer rápido for alterada quando o ciclo ainda não tiver sido iniciado, ela permanecerá inalterada até que o ciclo seja iniciado. No entanto, ele não permanecerá se a energia for desligada.
4. Se a tecla Iniciar/Parar for pressionada duas vezes durante um ciclo, o ciclo e o timer serão interrompidos. A reprodução é retomada quando a tecla Iniciar/Parar é pressionada duas vezes novamente.


OBSERVAÇÃO: Para evitar o travamento acidental do painel de controle sensível ao toque, observe o seguinte:

1. Não toque em duas ou mais teclas simultaneamente.
2. Não deixe nenhum líquido sobre o painel de controle.
3. Toques leves são suficientes, não pressione o painel de controle com força.

Se o painel de controle estiver bloqueado, faça o seguinte para reiniciá-lo. Se o primeiro passo não funcionar, passe para o segundo passo.

1. Desligue o interruptor de energia.
2. Desligue o interruptor de energia várias vezes.
3. Desligue o cabo de alimentação e aguarde de 5 a 10 minutos.
4. Deixe o aparelho desligado da tomada por várias horas.

MÉTODOS COMUNS DE LIMPEZA

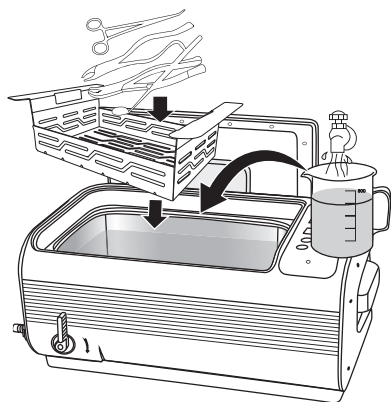

A. Limpeza regular

Use água filtrada para obter melhores resultados. Você pode adicionar uma solução de limpeza para instrumentos. Recomendamos o limpador de instrumentos OPTIM 28. Certifique-se de seguir as instruções de uso.


Locais adequados:

Consultórios e laboratórios odontológicos e médicos.

Método de limpeza:

1. Coloque os itens sujos na cesta e posicione a cesta dentro do tanque.
2. Adicione água ao tanque até cobrir a área a ser limpa, respeitando as marcações de MÍN e MÁX.
3. Ligue o interruptor de energia. Pressione a tecla Tempo para definir o timer. Consulte as instruções de uso do seu limpador e/ou instrumento para saber o tempo de utilização adequado. Pressione a tecla Iniciar/Parar duas vezes para iniciar a limpeza.

OBSERVAÇÃO: Durante a limpeza, a sujeira se desprenderá como uma nuvem e a água ficará gradualmente turva. Isso indica que detritos estão sendo removidos dos instrumentos e que eles estão sendo limpos.

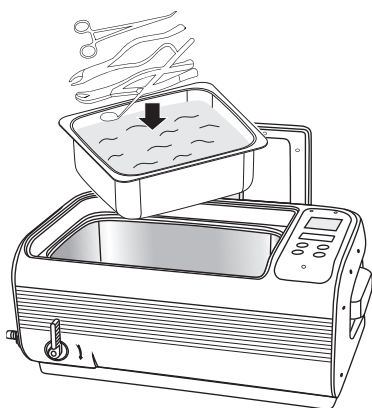

B. Limpeza indireta

Coloque os itens em um recipiente separado.

Limpe os itens usando ondas ultrassônicas para penetrar no recipiente.

Locais adequados: Salas de esterilização de instrumentos médicos e odontológicos. Diferentes aplicações utilizam diferentes fluidos dentro do recipiente.

1. Instrumentos pequenos, como brocas e limas. Mantenha-os separados da limpeza do instrumento principal.
2. Instrumentos que utilizam uma solução diferente, como removedor de cimento.
3. Instrumentos que utilizam soluções corrosivas, como desinfetantes corrosivos. Evite o contato da carcaça de plástico com soluções corrosivas.
4. Próteses dentárias ou moldagens para vários pacientes. Desinfete o recipiente após cada paciente.


Método de limpeza:

1. Coloque os itens a serem limpos no recipiente recomendado. Adicione a solução de limpeza do seu instrumento. Recomendamos o limpador de instrumentos OPTIM 28. Certifique-se de seguir as instruções de uso da solução de limpeza do instrumento.
2. Coloque o recipiente diretamente no tanque. Adicione água até um nível entre MIN e MAX, pelo menos meia polegada ou 13 mm acima do fundo do recipiente, mas não acima dele.
3. Ligue o interruptor de energia. Pressione a tecla Tempo para definir o timer para 10 minutos. Consulte as instruções de uso do seu limpador e/ou instrumento para saber o tempo adequado de utilização. Pressione a tecla Iniciar/Parar duas vezes para iniciar a limpeza. As ondas ultrassônicas penetrarão no recipiente e limparão os itens.

Seleção do recipiente:

1. Recipientes de plástico – Macios, absorvem de 30% a 40% das ondas ultrassônicas, reduzindo a eficácia da limpeza.
2. Recipientes de alumínio – Absorvem cerca de 20% da energia ultrassônica.
3. Béqueres de vidro – Absorvem cerca de 5 a 10% da energia ultrassônica.
4. Recipientes de aço inoxidável – Absorvem cerca de 8% da energia ultrassônica.

MÉTODOS COMUNS DE LIMPEZA

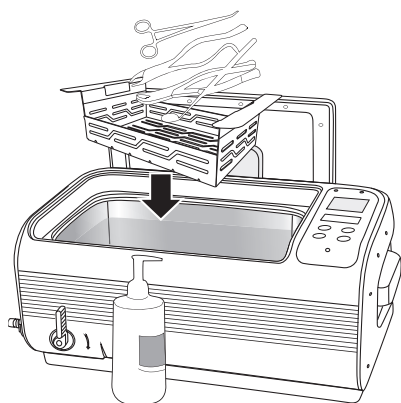


C. Limpeza avançada.

Detritos acumulados ao longo de um longo período de tempo, extremamente sujos.

Método de limpeza:

1. Objetos grandes podem ser colocados diretamente no tanque, enquanto objetos pequenos precisam ser colocados previamente na cesta. Não empilhe os objetos para evitar atrito durante a limpeza.
2. Adicione água à temperatura ambiente até a linha de enchimento máximo. Você pode adicionar uma solução de limpeza para instrumentos. Recomendamos o limpador de instrumentos OPT/IM 28. Certifique-se de seguir as instruções de uso.
3. Ligue a energia.
4. Pressione a tecla Tempo para definir o timer para 15 minutos. Pressione a tecla Iniciar/Parar duas vezes para iniciar a limpeza.
5. Quando parar, abra a válvula de drenagem para liberar a água suja. Feche a válvula em seguida.
6. Limpe o tanque e adicione água fresca. Lave as peças por mais 3 minutos para remover os resíduos de detergente e sujeira.

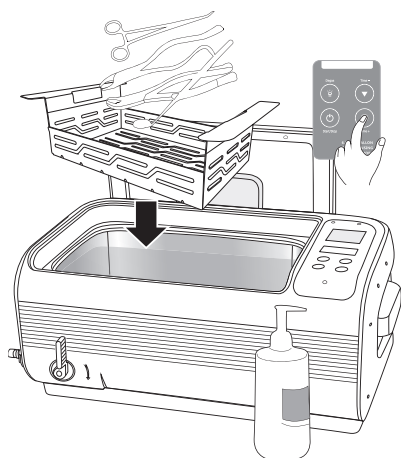

D. Limpeza especial


Objetos de prata, cobre ou latão que oxidam e escurecem precisam de limpeza especial.


Método de limpeza:

1. Coloque os itens na cesta e depois no tanque, adicionando água até um nível entre os indicados como MÍNIMO e MÁXIMO, cobrindo a área a ser limpa. Adicione a solução adequada para remover a oxidação do metal, de acordo com a proporção recomendada.
2. Pressione a tecla Tempo para definir o timer para 15 minutos.
3. Ao terminar, retire o cesto e os itens. Enxágue os itens com água da torneira ou siga o passo 6 na seção Limpeza Avançada.

Durante a limpeza, os detritos se desprendem como uma nuvem, sujando a água. Este método remove a oxidação da prata e do cobre, deixando os itens como novos.


VISTA EXPLODIDA DO PRODUTO

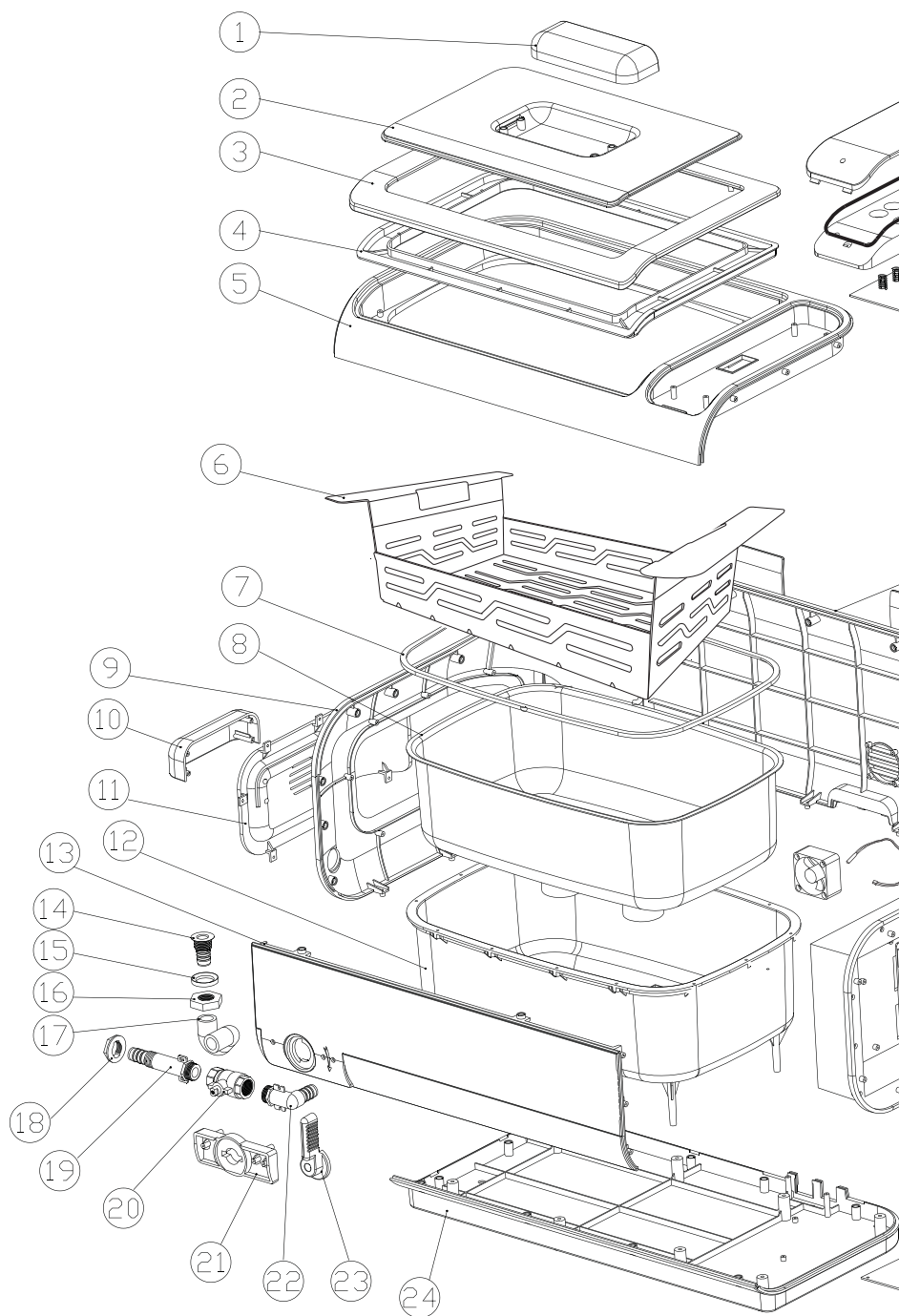

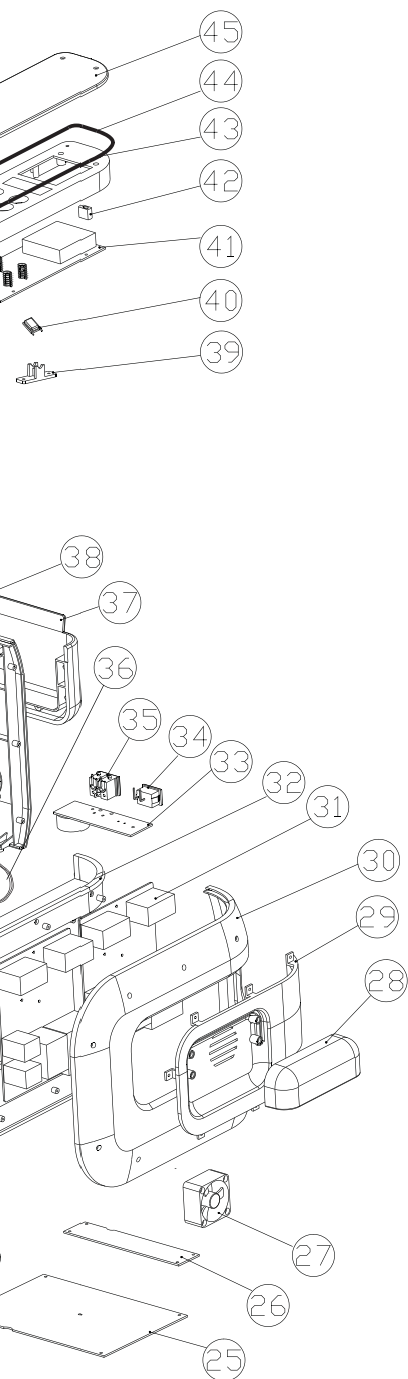

Nº	Item	Material
1	Alça superior	ABS
2	Janela na tampa	AS
3	Tampa	ABS
4	Tampa-fundo	ABS
5	Anel superior	ABS
6	Cesto de aço inoxidável	SUS 304
7	Vedação de silicone	Borracha de silicone
8	Tanque de aço inoxidável	SUS 304
9	Capa esquerda	ABS
10	Alça esquerda	ABS
11	Painel esquerdo	ABS
12	Tanque interno	ABS
13	Capa frontal	ABS
14	Ralo	SUS 304
15	Lavadora	AL
16	Noz	AL
17	Mangueira	Borracha
18	Noz	ABS
19	Bico	PP
20	Válvula de esfera	Peça padrão
21	Suporte	ABS
22	Cotovelo	PP
23	Alavanca da válvula	PC
24	Tampa inferior	ABS
25	Placa de circuito impresso de alimentação principal	94V0
26	Placa de circuito impresso do filtro	94V0
27	Ventilador de resfriamento	Peça padrão
28	Alça direita	ABS
29	Painel direito	ABS
30	Capa direita	ABS
31	Placa de circuito impresso do transdutor	94V0
32	Suporte de montagem de PCB	ABS
33	Placa de circuito impresso do interruptor de alimentação	94V0
34	Interruptor de alimentação	Peça padrão
35	Tomada elétrica	Peça padrão
36	Sensor térmico	Peça padrão
37	Suporte de capa	ABS
38	Contracapa	ABS
39	Suporte para sensor térmico	ABS
40	Interruptor térmico	A 0 - 3 A- F
41	Placa de circuito impresso do painel de controle	94V0
42	Tomada de lâmpada	ABS
43	Caixa do painel de controle	ABS
44	Vedação de silicone do painel de controle	Borracha de silicone
45	Tampa do painel de controle	PC

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

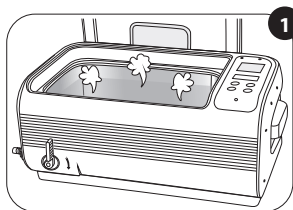


1 Não ligue o aparelho se não houver água no reservatório.

Embora o aparelho seja projetado com múltiplas proteções, se ele for ligado sem água por mais de 15 segundos, poderá sofrer danos graves e reduzir sua vida útil.




Um interruptor térmico está fixado na parte inferior do tanque de limpeza. Se o aparelho for ligado acidentalmente sem água no reservatório, a energia ultrassônica não será dissipada através do líquido e, em vez disso, ficará concentrada no reservatório, fazendo com que a temperatura continue a subir. Isso acionará o interruptor térmico, que cortará a energia para interromper o funcionamento do transdutor ultrassônico, evitando assim danos à unidade e risco de incêndio. O interruptor corta a energia por aproximadamente 6 a 10 minutos e depois a religa automaticamente.

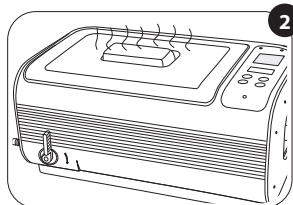


2 Não utilize o aparelho por períodos prolongados ou continuamente.

Projetado com proteção contra superaquecimento, se a unidade estiver em funcionamento por 45 minutos, recomenda-se desligá-la por 20 minutos para prolongar sua vida útil.

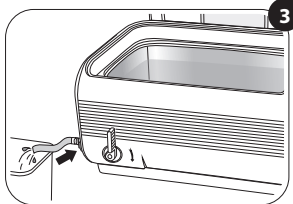


3 Não deixe produtos químicos no tanque de limpeza durante a noite ou quando ele estiver visivelmente sujo.

Após a limpeza, abra a válvula de drenagem para escoar a água suja. Limpe e seque bem o tanque.

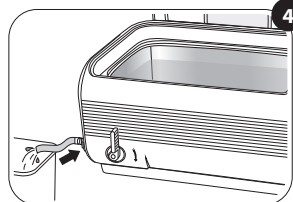


4 Não utilize água de osmose reversa ou água altamente purificada, pois elas corroem o aço inoxidável.

Não utilize produtos químicos corrosivos para aço inoxidável ou plástico ABS, que é o material da carcaça.

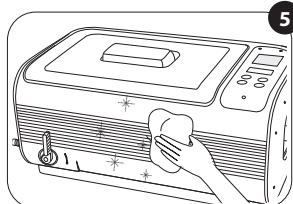

5 Não jogue água sobre a carcaça.

Use uma toalha para secar o tanque e a carcaça.

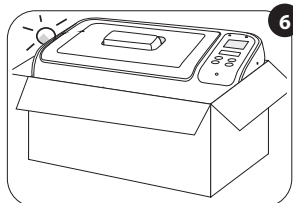

6 Não exponha a unidade à luz solar direta por períodos prolongados.

Mantenha o aparelho em local seco, fresco e ventilado.

Guarde a embalagem original caso precise enviar o produto para manutenção. Caso o produto não esteja mais disponível, utilize material de amortecimento suficiente, equivalente a no mínimo 2,5 cm de isopor, ao redor de toda a unidade dentro da caixa de transporte para evitar danos aos transdutores frágeis. A garantia não cobre danos ocorridos durante o transporte.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Procedimento de auditoria StatClean - Teste de folha

Os limpadores ultrassônicos devem ser testados pelo menos semanalmente quanto ao desempenho de limpeza, conforme o protocolo recomendado nas instruções de uso do fabricante. Os resultados dos testes devem ser documentados.

Procedimento:

1. Remova a tampa, o cesto, os recipientes e quaisquer béqueres.
2. Limpe o tanque completamente.
3. Encha o reservatório com água até a linha de enchimento máximo e adicione uma solução de limpeza para instrumentos; recomendamos OPTIM 28 (não recoloque o cesto).
4. Pegue um pedaço de fita adesiva para autoclave e passe-o do canto frontal esquerdo até o canto traseiro direito.
5. Pegue um pedaço de papel alumínio doméstico comum e corte 3 pedaços de 2 cm (3/4") de largura e 14 cm (5,5") de comprimento. Dobre cada peça em forma de L ao longo do seu comprimento.
6. Cole os 3 pedaços uniformemente espaçados da esquerda para a direita no centro do tanque, fixando a ponta na parte inferior da fita. Mantenha a folha de alumínio na vertical dentro da água, com a borda inferior a aproximadamente 1 cm (1/2") acima do fundo do tanque.
7. Recoloque a tampa na unidade.
8. Ligue o aparelho ultrassônico e deixe-o funcionar por 1 minuto.
9. Assim que o tempo determinado for atingido, desligue o aparelho e remova a tampa.
10. Retire as películas protetoras e inspecione. As folhas devem ser perfuradas ao longo das 3 bordas, com mais perfurações na parte inferior.
11. Se alguma das lâminas, à esquerda ou à direita, não apresentar perfurações visíveis, o transdutor próximo a essa lâmina pode não estar funcionando corretamente. Chame a assistência técnica se isso acontecer.

ESPECIFICAÇÕES

Descrição	Limpador ultrassônico StatClean	
Modelo	SC-P4862 / SC-P4862-CE	
Capacidade do tanque	6,0 L / 1,6 galões (EUA)	Máx. 5,0 L / 1,3 galões (EUA) Mín. 3,35 L / 0,9 galões (EUA)
Tamanho do tanque	32,3 x 20,5 x 9,9 cm / 12,8" x 8,1" x 3,9"	
Item mais comprido cabe dentro do tanque	34,0 cm / 13,4"	
Fonte de energia	120 W (CA 100~120 V 50/60 Hz) 140 W (CA 220~240 V 50/60 Hz) 120 W (CA 100 V 50/60 Hz)	
Configurações do timer digital	Temporizador de alcance total de 1 a 30 minutos	
Drenagem	Válvula de drenagem	
Frequência ultrassônica	35.000 Hz	
Material do tanque	Aço inoxidável SUS304	
Material da carcaça	ABS	
Peso líquido	7,5 kg / 16,5 lb	
Peso bruto	8,6 kg / 19,0 lb	
Tamanho da unidade	51,5 x 30,5 x 24,0 cm / 20,3" x 12,0" x 9,4"	
Dimensões da caixa interna	57,5 x 37,0 x 32,5 cm / 22,6" x 14,6" x 12,8"	
Quantidade por caixa master	1 unidade/caixa	
Tamanho da caixa master	60,0 x 38,5 x 34,5 cm / 23,6" x 15,2" x 13,6"	

Garantia

Esta unidade possui garantia de dois anos para peças e mão de obra em caso de defeitos de qualidade. Danos causados por uso indevido ou negligência no uso do aparelho não são cobertos. A unidade reparada deverá ser enviada apenas para endereços nos Estados Unidos continentais e no Canadá. Entre em contato conosco primeiro e, em seguida, envie a unidade com uma cópia da fatura ou recibo original para:

Para todas as consultas nos EUA:

Coltene/Whaledent Inc
235 Ascot Pkwy
Cuyahoga Falls, OH 44223
1-800-221-3046 | www.scican.com


DETENTOR DO REGISTRO:

H. STRATTNER & CIA LTDA

Praia de Botafogo, 228 – Andar 19
Botafogo – Rio de Janeiro – RJ – Brasil
CEP: 22250-040

Registro ANVISA: 10302860327

COLTENE International Dental Group

Fabricado para:
Dent4You AG 
Bahnhofstrasse 2
CH-9435 Heerbrugg

Distribuído por:
SciCan Ltda.
1440 Don Mills Rd,
Toronto, ON
M3B 3P9 / Canadá
T +1 416-445-1600
customerservice@scican.com